

**Filtek™ Z350 XT**  
Restaurador Universal

Seleccione el tono adecuado usando la guía de color VITAPAN® Clásica y la guía de color circular de 3M ESPE Filtek™ Z350 XT

- Prepare el diente y aíselo.



1

**Aplique Liner / Base si desea:**

- Mezcle el 3M ESPE Vitrebond™ o 3M ESPE Vitrebond™ Plus.
- Aplique una capa delgada del liner / base en la superficie de la dentina.
- Fotocure.



2

**Procedimiento de Adhesión:**

- Siga el procedimiento de adhesión suministrado en las instrucciones de uso del sistema adhesivo de su preferencia.



3

**Coloque la resina – Caja Proximal:**

- Para asegurar una buena adaptación, coloque el tono seleccionado de **Cuerpo** (o **Dentina**) del restaurador Filtek™ Z350 XT en incrementos de 1mm en la caja proximal de la base de la cavidad.
- Fotocure.

## Filtek™ Z350 XT

### Restaurador Universal

#### Opacidades

Cuerpo,	Esmalte,	Traslúcido
Dentina,	A6B y B5B	

#### Incremento

2.0 mm
1.5 mm

#### Tiempo de curado

20 sec.
40 sec.



4

#### Coloque la Resina – Dentina:

- Continúe colocando el tono **Cuerpo** (o **Dentina**) de Filtek™ Z350 XT en incrementos.
- Utilice la estructura coronaria del diente restante como guía para la colocación y adaptación.
- Fotocure.



5

#### Coloque la Resina – Sustitucion del Esmalte:

- Coloque el tono el tono seleccionado de **Esmalte** (o **Traslúcido**) de Filtek™ Z350 XT en incrementos.
- Utilice la estructura coronaria del diente restante como guía para la colocación y adaptación.

*Rebose ligeramente*

- Fotocure.

**Filtek™ Z350 XT**  
Restaurador Universal

6

**Terminado y Pulido:**

- Termine la superficie oclusal usando un instrumento de terminado apropiado.
- Termine las superficies inter proximales con los discos 3M ESPE Soflex™ Extra delgados.



7

**Oclusión:**

- Verifique la oclusión lateral y central
- Ajuste de ser necesario

**3M ESPE**

Productos odontológicos. St Paul, MN 55144-1000 USA [www.3MESPE.com](http://www.3MESPE.com)  
Vitapan es una marca registrada de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG  
3M, ESPE, Filtek y Soflex son marcas registradas de 3M o 3M ESPE AG.  
© 3M 2010. Todos los derechos Reservados.



44-0007-4788-9