

Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal



1

Preparación:

- Seleccione el tono adecuado usando la guía de color VITAPAN® Clásica.
- Seleccione el tono de la resina usando la guía de color circular de 3M ESPE Filtek™ Z350 XT.
- Bisele los márgenes del Esmalte.



2

Procedimiento de Adhesión:

- Siga el procedimiento de adhesión suministrado en las instrucciones de uso del sistema adhesivo de su preferencia.



3

Coloque la Resina – Sustitución de la Dentina:

- Coloque y cure el tono de **Dentina** de la Resina 3M ESPE Filtek™ Z350 XT para obtener la opacidad y la intensidad del color.
- Fotocure.

Opacidades

Cuerpo, Esmalte, Traslúcido
Dentina, A6B y B5B

Incremento

2.0 mm
1.5 mm

Tiempo de curado

20 seg.
40 seg.

Filtek™ Z350 XT

Restaurador Universal



4

Coloque la Resina – Sustitución de la Dentina:

- Coloque y cure el tono **Cuerpo** de Filtek™ Z350 XT a las uniones de esmalte y dentina.


Fotocure.



5

Coloque la Resina – Sustitución del Esmalte:

- Complete la preparación usando el tono seleccionado de **Esmalte** y / o **Traslúcido** de Filtek™ Z350 XT para dar la transparencia y profundidad del color y ajuste al eje incisal.
- Fotocure.

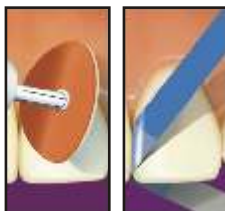

6

Terminado y Pulido:

- Use los discos y tiras 3M ESPE Soflex™.
- Los resultados estéticos se harán mas evidentes al crear una textura de la superficie similar a la de los dientes adyacentes.

3M ESPE

Productos odontológicos. St Paul, MN 55144-1000 USA www.3MESPE.com
Vitapan es una marca registrada de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
3M, ESPE, Filtek y Soflex son marcas registradas de 3M o 3M ESPE AG.

© 3M 2010. Todos los derechos Reservados.



44-0007-4786-3