

Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal



1

Preparación:

- Seleccione el tono adecuado usando la guía de color VITAPAN® Clásica.
- Seleccione el tono de la resina utilizando la guía de color circular de 3M ESPE Filtek™ Z350 XT como referencia.
- Prepare el diente.
- Bisele los márgenes del esmalte.



2

Procedimiento de Adhesión:

- Siga el procedimiento de adhesión suministrado en las instrucciones de uso del sistema adhesivo de su preferencia.



3

Coloque la Resina –Dentina:

- Ponga y cure el **Cuerpo** (o **Dentina**) de Filtek™ Z350 XT en capas a las uniones de esmalte y dentina.
- Foto cure.

Filtek™ Z350 XT

Restaurador Universal



4

Coloque la Resina – Esmalte

- Complete la preparación usando el **Cuerpo** (o **Esmalte**) de Filtek™ Z350 XT.
- Foto cure.

Opacidades

Cuerpo, Esmalte, Traslúcido

Dentina, A6B y B5B

Incremento


2.0 mm

1.5 mm

Tiempo de curado

20 sec.

40 sec.

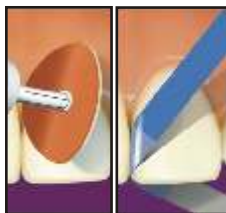

5

Terminado y Pulido

- Utilice los discos 3M ESPE Soflex™ de terminado y pulido.
- Los resultados estéticos se harán mas evidentes al crear una textura de la superficie similar a la de los dientes adyacentes.

3M ESPE

Productos odontológicos. St Paul, MN 55144-1000 USA www.3MESPE.com
 Vitapan es una marca registrada de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
 3M , ESPE, Filtek y Soflex son marcas registradas de 3M o 3M ESPE AG.

© 3M 2010. Todos los derechos Reservados.



44-0007-4787-1