


Filtek™ Z350 XT Restaurador Universal



Seleccione el tono adecuado usando la guía de color VITAPAN® Clásica y la guía de color circular de 3M ESPE Filtek™ Z350 XT

- Prepare el diente y aíselo.

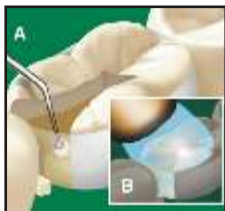

1

Aplique Liner / Base si desea:

- Mezcle el 3M ESPE Vitrebond™ o 3M ESPE Vitrebond™ Plus.
- Aplique una capa delgada del liner / base en la superficie de la dentina.
- Fotocure.



2

Procedimiento de Adhesión:

- Siga el procedimiento de adhesión suministrado en las instrucciones de uso del sistema adhesivo de su preferencia.



3

Coloque la resina – Caja Proximal:

- Para asegurar una buena adaptación, coloque el tono de **Cuerpo** de Filtek™ Z350 XT en incrementos de 1 mm en la caja proximal en la base de la cavidad.
- Fotocure.

Opacidades

Cuerpo, **Esmalte**, **Traslúcido**
Dentina, **A6B y B5B**

Incremento

2.0 mm
1.5 mm

Tiempo de curado

20 sec.
40 sec.

Filtek™ Z350 XT

Restaurador Universal



4

Coloque la Resina:

- Continúe colocando el tono **Cuerpo** de Filtek™ Z350 XT en incrementos.
- Utilice la estructura coronaria del diente restante como guía para la colocación y adaptación.

Rebose ligeramente

- Fotocure.



5

Terminado y Pulido:

- Termine la superficie oclusal usando un instrumento de terminado apropiado.
- Termine las superficies interproximales con los discos 3M ESPE Soflex™ Extra delgados.



6

Oclusión:

- Verifique la oclusión lateral y central.
- Ajuste de ser necesario.

3M ESPE

Productos odontológicos. St Paul, MN 55144-1000 USA www.3MESPE.com
Vitapan es una marca registrada de VITA Zahnfabrik H. Rauter GmbH & Co. KG
3M, ESPE, Filtek y Soflex son marcas registradas de 3M o 3M ESPE AG.
© 3M 2010. Todos los derechos Reservados.



44-0007-4789-7